

## ACQUA OSSIGENATA 12 V

### SOLUZIONE PRONTA ALL'USO PER LAVAGGI ENDOCANALARI

#### 1. COMPOSIZIONE

Soluzione acquosa stabilizzata di Perossido d'Idrogeno al 3,6% p/p circa.

#### 2. PROPRIETA'

L'acqua ossigenata 12 V è caratterizzata da un buon potere ossidante.

Usata alternativamente all'ipoclorito di sodio (NICLOR-5) sviluppa energicamente ossigeno espellendo dai canali ogni residuo organico minerale.

#### 3. INDICAZIONI

Soluzione pronta all'uso per il lavaggio e la pulizia dei canali dentali durante l'alesaggio.

#### 4. MODALITA' D'USO

Aprire il sigillo a strappo della capsula di chiusura

Inserire un ago ipodermico per eliminare la pressione interna del flacone

Estrarre l'ago ipodermico ed inserire una siringa con ago a punta smussa per lavaggi canalari

Dopo aver aspirato una quantità sufficiente di soluzione, lavare il canale alternativamente con il prodotto e con NICLOR-5 in modo da favorire la formazione di un'effervescenza che espelle dal canale i detriti formatisi durante la strumentazione

Terminare il trattamento con lavaggi di Soluzione Fisiologica o acqua bidistillata: è importante eliminare ogni residuo di acqua ossigenata prima di procedere alla chiusura definitiva del canale onde evitare la formazione di pressione gassosa all'interno del dente.

#### 5. RISCHI

Leggermente irritante per gli occhi e per la pelle.

#### 6. PRECAUZIONI

Per i lavaggi si consiglia l'uso di specifici aghi per lavaggi canalari che essendo spuntati evitano il rischio accidentale di iniettare il prodotto.

Usare inoltre l'apposita diga onde evitare una stasi del prodotto sulla mucosa che potrebbe irritarsi.

Attenzione: nell'interno del flacone può determinarsi un lieve grado di pressione; una leggera deformazione della chiusura non pregiudica l'idoneità del prodotto all'impiego.

Per garantire la corretta conservazione del prodotto si consiglia di non rimuovere completamente la capsula metallica di chiusura ma solo il sigillo a strappo.

#### 7. AVVERTENZE

##### USO ESTERNO – NON INIETTABILE – NON INGERIRE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.


In caso di contatto con la pelle o gli occhi lavarsi immediatamente con abbondante acqua.

Usare indumenti protettivi adatti e proteggere gli occhi e il viso.

Non disperdere la confezione nell'ambiente dopo l'uso.

#### 8. CONSERVAZIONE

Conservare il flacone a temperatura non superiore

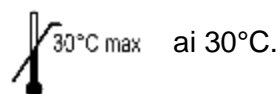

#### 9. PRESENTAZIONE

Flacone di vetro da 250 ml

#### 10. REGIME DI UTILIZZO

Riservato all'uso professionale nella pratica odontoiatrica.

**11. VALIDITA'**  
36 Mesi.

Cod. 15002

Rev. 3 del 04-2010

*OGNA Laboratori Farmaceutici*  
*Via Figini, 41 – 20053 Muggiò (MI)*  
*Divisione Odontoiatrica – tel. 039/2782954- fax 039/2782958*  
*Web: [www.ognalaboratori.it](http://www.ognalaboratori.it)*